
Instrukcja użycia

Urządzenia /elementy sterownicze

- a) Wyłącznik główny z lampką sygnalizacyjną
- b) Regulator temperatury

Ustawienie

Inkubator Cultura może być używany w pozycji pionowej lub poziomej (przełącznik skierowany do góry).

Objaśnienia rysunków (patrz tylna strona opakowania)

1. Inkubator Cultura może być używany w pozycji pionowej lub poziomej
2. Wyłącznik główny z lampką sygnalizacyjną
3. Regulator temperatury

Instalacja

- a) Wyjmij inkubator z opakowania i podłącz go do sieci elektrycznej.
- b) Umieść stojak w odpowiedniej pozycji i włóż do niego termometr.
- c) Włącz inkubator i sprawdź, czy świeci lampka sygnalizacyjna.
- d) Po 30 minutach inkubator powinien osiągnąć temperaturę około 35°C.

Temperatura

Temperaturę roboczą można zmieniać przekręcając gwint przy pomocy śrubokrętu. Przekręcając gwint w lewo dochodzi do obniżenia temperatury, a w prawo do podwyższenia temperatury

(przekręcenie o 15° to zmiana o około 1°C).

Zalecenia

Upewnij się, czy drzwiczki są starannie zamknięte i nie otwieraj je więcej niż o 90°. Zapewnij ochronę drzwiczek przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Nie umieszczaj probówek z tworzywa sztucznego bezpośrednio na dno inkubatora, ale zawsze używaj stojaka.

Czyszczenie

Inkubator Cultura można czyścić zwykłymi środkami do mycia i dezynfekcji.

Uwaga: Do czyszczenia nie należy używać płynów zawierających metanol, aceton, itp.

Uszkodzenie inkubatora

Jeżeli urządzenie przestało działać, sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony.

Inkubator Cultura jest wyposażony w bezpiecznik zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu. Bezpiecznika nie można zresetować ani zmienić, należy skontaktować się z dostawcą inkubatora.

Konserwacja / regularne kontrole

Inkubator Cultura nie wymaga żadnych specjalnych kontroli. Zaleca się regularne kontrole wzrokowe.

Należy przede wszystkim sprawdzać kabel zasilający i wszelkie ewentualne uszkodzenia oraz jego umieszczenie. W przypadku uszkodzenia kabla inkubator należy natychmiast odłączyć od sieci i nie używać. Temperatura pracy inkubatora powinna być regularnie sprawdzana, a jeśli to konieczne, to również ponownie nastawiona.

Dane techniczne

Zarejestrowana nazwa:

Cultura

Numer katalogowy: 68306 (230V=70700)

Zakres temperatur: 25-45°C

Dokładność temperatury: +/- 1°C

Napięcie: 230 V = 30 W

Częstotliwość: 50 Hz/ 60 Hz

Klasa bezpieczeństwa: II

Materiał: PC&ABS

Materiał drzwiczek: PC, przezroczysty

Termometr: do 60°C, w specjalnym opakowaniu

Podstawowy materiał: ABS

Gwarancja: 2 lata od daty sprzedaży produktu

Wymiary zewnętrzne:

310x155x168mm
(Dł. x Wys. x Szer.)

Wymiary wewnętrzne:

220x120x150mm
(Dł. x Wys. x Szer.)

Masa: 1,1 kg

Znak CE

Orion Diagnostica

Przedstawicielstwo dla CZ, HU, PL, SK

Bělohorská 57, 169 00 Praga 6

Tel.: +48 664 382 811, Faks: +420 233 350 532

e-mail: orion@oriondiagnostica.pl, www.oriondiagnostica.pl